

BlephaDemodex chust. 30 szt.



Cena: 81,58 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	30 szt.
Postać	Chusteczki
Producent	LABORATOIRES THEA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

BLEPHADEMODEX to wyrób medyczny w postaci jednorazowych, sterylnych chusteczek do higieny rzęs i powiek, podczas infekcji nużeńcami.

Gotowe do użycia, jałowe chusteczki są nasączone płynem oczyszczającym bez konserwantów, zawierającym terpinen-4-ol (oczyszczony wyciąg z olejku z drzewa herbacianego) oraz nawilżający i kojący hialuronian sodu. Blephademodex® oczyszcza powieki i rzęsy z zanieczyszczeń i czynników zakaźnych oraz łagodzi objawy związane z zakażeniem nużeńcami takie, jak: swędzenie, pieczenie, suchość i stan zapalny powie, przez usunięcie pasożytów. Zaczerwienienie brzegów powiek, uczucie podrażnienia i obecności ciała obcego w oku ulegają zmniejszeniu. Produkt testowany pod kontrola okulistyczna, pod kątem bezpieczeństwa dla narządu wzroku.

Opakowanie:
BLEPHADEMODEX opakowanie zawiera 30 szt. jednorazowych sterylnych chusteczek

Sposób użycia:

1. Umyć ręce.
2. Otworzyć saszetkę i rozłożyć chusteczkę. Umieścić ściereczkę na palcu wskazującym i zawinąć ją. Trzymając oko zamknięte, delikatnie przyłożyć chusteczkę do powiek i nasady rzęs. Ostrożnie masować powieki małymi, okrężnymi ruchami, usuwając wszelkie strupki (zanieczyszczenia), łupież czy wydzieliny.
3. Należy trzymać oko zamknięte przez 15 sekund po aplikacji.
4. Czynność powtórzyć wokół drugiego oka, używając nowej chusteczki.

BLEPHADEMODEX jest nietłusty i nie wymaga spłukiwania po użyciu.

Skład:
Sterylnie chusteczki nasączone płynem.
Płyn zawiera:
Płyn zawiera: PEG-8, Polisorbat 80, Poloxamer 184, Terpinen-4-ol, PEG-6 glicerydy kaprylowe / kaprynowe - makrogol 6 glicerol kaprylokaprynowy, hialuronian sodu, fosforan dipotasowy, diwodorofosforan potasu, woda oczyszczona.