

# Corega Power Max Krem Osłona Miętowy 40g

Cena: 23,57 PLN



## Opis słownikowy

Opakowanie	40 g
Postać	krem
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

**Corega Power Max miętowy krem mocujący do protez zębowych** to wyrób medyczny, który mocuje protezę nawet na 12 godzin. Ten krem mocujący pomaga też chronić dziąsła przed naciskiem i zabezpiecza je przez cały dzień. Ponadto nie zawiera cynku ani dodatkowych barwników czy aromatów. Dzięki temu nie wpływa na smak jedzenia.

## Zawartość opakowania

Skład: Kopolimer wapniowo-sodowy PVM/MA, wazelina, guma celulozowa, parafina płynna, aromat, CI 73360, CI 15850.

## Przeznaczenie produktu

Krem do mocowania protez zębowych.

## Stosowanie produktu

Oczyść i osusz protezę i wypłucz usta. Następnie postępuj zgodnie z ilustracjami na opakowaniu, by w odpowiedni sposób nanieść produkt na protezę częściową lub całkowitą. Włóż protezę i mocno ją dociśnij. Przygryź ją na kilka sekund i gotowe! Przed wyjęciem

protezy zębowej przepłucz usta wodą, a następnie poruszaj protezą.

## Przeciwwskazania i środki ostrożności

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na produkt,

W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. Mogą wystąpić inne działania niepożądane, takie jak podrażnienia jamy ustnej i objawy ze strony przewodu pokarmowego.