

COREGA ULTRA HAFTCREME FRISCH Klej 40g



Cena: 20,19 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	40 g
Postać	pasta
Producent	PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

Krem mocujący do protez zębowych Corega to pewność siebie w każdej sytuacji, dzięki mocnemu trzymaniu przez cały dzień. Uszczelnia i zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod protezę, zapewniając tym samym komfort i wygodę. W swoim składzie nie zawiera cynku i posiada delikatnie miętowy smak, który odświeża oddech.

Skład

Calcium-Sodium PVM/MA Copolymer, Petrolatum (wazelina), Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum (parafina ciekła), Propylparaben, Aroma, CI 45430.

Aplikacji kremu mocującego Corega

- Nanieś kilka krótkich (6 mm) pasków kremu na czystą i suchą protezę, niezbyt blisko krawędzi.
- Zbyt duża ilość kremu, może spowodować jego wypłynięcie.
- Przed włożeniem protezy wypłucz jamę ustną wodą.
- Włóż protezę i dokładnie dociśnij ją, następnie przygryź na kilka sekund.
- Pamiętaj, aby końcówka tubki i nakrętka była sucha. Dzięki temu się nie zatka.

Sposób wyjmowania protezy

- Przepłucz jamę ustną wodą.
- Powoli wyjmij protezę, delikatnie ją poruszając kołyszącym ruchem.
- Resztki kleju mocującego usuń z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki do zębów.
- W celu dokładnego oczyszczenia protez używaj preparatów specjalnie przeznaczonego do tego celu, postępując zgodnie z

instrukcją.

Ostrzeżenie

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników kremu.
- W przypadku wystąpienia dyskomfortu stosowanie produktu należy przerwać.
- Jeżeli wystąpi podrażnienie, należy zaprzestać używania.
- Nieliczne osoby mogą być uczulone na składniki tego produktu.
- Preparat należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Tubka kremu mocującego Corega 40 g powinna wystarczyć na 3 tygodnie stosowania.
- W przypadku, jeżeli okres ten jest krótszy, zużywana jest zbyt duża ilość produktu.
- Może to oznaczać nieprawidłowe dopasowanie protezy i wymaga skonsultowania ze specjalistą.