

## COREGA ULTRA HAFTCREME NEUTRAL Krem 40g

Cena: 19,58 PLN



## Opis słownikowy

Opakowanie	40 g
Postać	krem
Producent	PPHU MINI-MAXI IRENA WYDRA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

## Opis produktu

**Krem mocujący do protez zębowych Corega** zapewnia mocne, trójwymiarowe mocowanie, dzięki czemu proteza pozostaje na miejscu przez cały dzień, dając uczucie komfortu. Co więcej, uszczelnia protezę i zapobiega dostawaniu się drobinom pokarmu pod jej powierzchnię. Krem w wyniku kontaktu z wilgocią (śliną) puchnie, sprawiając, że powietrze obecne między płytą protezy a tkanką jamy ustnej zostaje wyparte. Zmniejsza to puste przestrzenie między dziąsłami a protezą, a w konsekwencji umożliwia pacjentowi pewny zgryz i daje sposobność jedzenia zdrowszych, bardziej urozmaiconych pokarmów. Krem nie zawiera cynku, aromatów i barwników, a jego neutralny smak nie zmienia smaku spożywanych potraw.

## Skład

Calcium/Sodium PVM/MA, Copolymer, Petrolatum (wazelina), Cellulose Gum, Paraffinum Liquidum (parafina ciekła).

## Założenie protezy

- Umyj i wysusz protezę.
- Przed włożeniem protezy do ust wypłucz jamę ustną.
- Nałóż kilka krótkich pasków kremu (6 mm) na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi (jak pokazano na opakowaniu).
- Następnie włóż protezę, dociśnij ją mocno i przygryź na kilka sekund.
- Odczekaj kilka minut, zanim będziesz jeść lub pić.
- Jeżeli stosujesz krem po raz pierwszy, użyj małej jego ilości. Ustalenie właściwej ilości kremu może wymagać kilku prób.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji stosowania podanych na opakowaniu.

## Wymywanie protezy

- Przed wyjęciem protezy zębowej przepłucz jamę ustną ciepłą wodą.
- Powoli wyjmij protezę, delikatnie nią poruszając.
- W celu usunięcia resztek kremu z protezy zanurz ją w roztworze tabletek czyszczących Corega według instrukcji stosowania i usuń pozostałości kremu szczoteczką.
- Aby usunąć krem mocujący z jamy ustnej, umyj dziąsła i podniebienie szczoteczką i ciepłą wodą.

## Ostrzeżenie

- zapewnia trwałe mocowanie przez cały dzień, ma neutralny smak.
- U niektórych osób może występować nadwrażliwość lub uczulenie na produkt.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu.
- Przechowywać w sposób niewidoczny i niedostępny dla dzieci.