

FRIDABABY Windi kateter rektalny 1op.(10sz



Cena: 32,82 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 op. (10 szt.)
Postać	-
Producent	PROFIMED SP.Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Fridababy Windi kateter rektalny dla niemowląt, na kolkę

DZIAŁANIE:

Kateter rektalny Windi jest bezpiecznym, szwedzkim wyrobem medycznym przeznaczonym do usuwania gazów z układu pokarmowego niemowląt.

Stosowany zgodnie z instrukcją nie podrażnia błony śluzowej odbytu.

Pomaga uniknąć stosowania preparatów farmaceutycznych.

Opakowanie zawiera 10 sztuk katetrów.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

- Krok 1:
Delikatnie rozmasuj brzusek dziecka zgodnie z ruchem wskazówek zegara kierując się do dołu.
- Krok 2:
Natłuść końcówkę katetera Windi, na przykład olejem kokosowym lub lubrikantem z atestem dla niemowląt.
- Krok 3:
Unieś nóżki dziecka i przygotuj pieluchę.
- Krok 4:
Delikatnie wprowadź końcówkę katetera Windi do odbytu. Odczekaj kilkanaście sekund, aż usłyszysz wydostające się na zewnątrz gazy. W razie potrzeby czynność powtórz. Po usunięciu gazów, wyjmij i wyrzuć użyty kateter.

OSTRZEŻENIA:

Nie zostawiać rurki Windi w odbycie dziecka! Po każdorazowym zabiegu rurkę Windi należy wyrzucić. Ponowne użycie tego samego

przyrządu Windi może stanowić ryzyko infekcji. Nie używać Windi częściej niż trzy razy na dobę.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.