

Help4skin gojenie oparzeń żel 75 g



Cena: 42,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	75 g
Postać	żel
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: POLPHARMA

ILOŚĆ: 75 g

OPIS:

Help4Skin Gojenie Oparzeń to żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie się ran. Od 2. roku życia.

DZIAŁANIE:

Help4Skin Gojenie Oparzeń żel hydrokoloidowy to wyrób medyczny, który w sposób pośredni przyspiesza gojenie ran poprzez regulację ich mikrośrodowiska. Zawiera karbomer stabilizowany karnozyną, peptydem występującym naturalnie w skórze, który korzystnie wpływa zarówno na suche jak i wilgotne, sączące się rany. Właściwa pielęgnacja oparzeń i ran jest niezbędna dla zapobiegania komplikacjom towarzyszącym procesom ich gojenia i zablizniania. Help4Skin jest inteligentnym hydrożelem, który reguluje poziom wilgotności rany. Nie tylko zabezpiecza ranę przed wysychaniem lecz także absorbuje wilgoć, gdy rana staje się zbyt wilgotna. Natychmiast chłodzi i koi oparzone miejsce.

SKŁAD:

Kwaśny koloidalny karbomer, karnozyna, woda, benzoesan sodu, sorbinian potasu.

SPOSÓB UŻYCIA:

Dokładnie umyć ręce przed i po użyciu preparatu na ranę. Powierzchowe oparzenia: natychmiast po wystąpieniu oparzenia należy schładzać jego miejsce pod letnią bieżącą wodą przez 20 minut. Należy to zrobić jak najszybciej, gdyż korzystny efekt schładzania oparzonego miejsca zmniejsza się z upływem czasu, a po 30 minutach całkowicie zanika. Aby zapobiec hipotermii nie zaleca się stosowania zimnej wody raz lub dwa razy dziennie aplikować grubą warstwę preparatu Help4Skin gojenie oparzeń na ranę nie dotykając rany dozownikiem. Nie wcierać jeśli to konieczne stosować opatrunek. Oparzenia słoneczne: oczyścić oparzone miejsce raz lub dwa razy dziennie aplikować grubą warstwę preparatu Help4Skin gojenie oparzeń na ranę nie dotykając rany dozownikiem. Nie wcierać. Jeśli to konieczne stosować opatrunek. Drobne rany: oczyścić i zdezynfekować ranę jeżeli to konieczne ostrożnie osuszyć sterylną gazą raz lub dwa razy dziennie aplikować grubą warstwę preparatu Help4Skin gojenie oparzeń na ranę nie dotykając rany dozownikiem. Nie wcierać. Jeśli to konieczne stosować opatrunek.

OSTRZEŻENIA:

Nie używać w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności (podanego na opakowaniu).

Nie należy stosować na duże otarcia (większe niż 20 cm²).

Nie stosować na twarz, oczy, powieki oraz błony śluzowe.

Należy zawsze zasięgnąć porady lekarza:

W przypadku dużych, obszernych lub bardzo głębokich ran,

W przypadku silnie zakażonych ran,

W przypadku wolnego gojenia się rany lub ryzyka powikłań.

Przechowywać w temperaturze między 5°C a 25°C.

Trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Chronić od światła i wilgoci.