

Hylo-Parin krop.do oczu 10 ml



Cena: 64,79 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	10 ml
Postać	krop.do oczu
Producent	URSAPHARM ARZNEMITTEL GMBH
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

Opis produktu

HYLO PARIN®

DZIAŁANIE:

HYLO PARIN® nawilża i pielęgnuje rogówkę i spojówki, uwalniając oczy od podrażnień wywołanych negatywnym wpływem otaczającego środowiska. Dzięki zastosowaniu HYLO PARIN®, objawy takie jak: zaczerwienienie, pieczenie, swędzenie oczu ulegają wyraźnemu zmniejszeniu.

WSKAZANIA:

Do nawilżania i pielęgnacji rogówki i spojówek w przypadku podrażnień oczu połączonych z zaczerwienieniem, pieczeniem i swędzeniem.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

HYLO PARIN® należy stosować jedynie w przypadku nieuszkodzonego zamknięcia opakowania zewnętrznego.

Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nakładkę z dozownika. W tym celu proszę chwycić nakładkę tuż ponad butelkę. Drugą ręką wysunąć ruchem obrotowym butelkę z nakładki. Przed pierwszym użyciem proszę skierować butelkę zakraplaczem pionowo do dołu i naciskać kilkakrotnie na denko butelki, aż do ukazania się pierwszej kropli roztworu.

Trzymając butelkę zakraplaczem do dołu oprzeć kciuk na górnej części butelki, a palec wskazujący i środkowy ułożyć na jej denku.

Oprzeć rękę trzymającą butelkę HYLO DUAL® na drugiej ręce.

Odchylając nieznacznie głowę do tyłu, wolną ręką odciągnąć dolną powiekę oraz szybko i zdecydowanie naciśnąć na denko butelki. Zostaje wówczas uruchomiony mechanizm podania jednej kropli roztworu. Dzięki szczególnej technice wentylowej systemu

COMOD® wielkość kropli i szybkość jej podawania będzie każdorazowo taka sama, niezależnie od siły nacisku na denko. Po zakropleniu należy powoli zamknąć powieki, umożliwiając równomierne rozprzodzenie roztworu po powierzchni oczu.

Po każdorazowym użyciu butelkę starannie zamknąć nakładką, zwracając jednocześnie uwagę, aby końcówka zakraplacza pozostała sucha. Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem oraz skórą twarzy. Z butelki COMOD® może być pobrane 10 ml roztworu, co odpowiada około 300 kroplom. Ze względów technicznych, po zużyciu całych 10 ml roztworu, pozostaje na dnie butelki niewielka jego ilość, ponad gwarantowaną objętość. Należy przestrzegać zasady, że jednego opakowania preparatu używa zawsze ta sama osoba.

SKŁAD:

HYLO PARIN® jest sterylnym roztworem bez środków konserwujących, zawierającym 1 mg/ml hialuronianu sodu, 1300 j.m./ml heparynianu sodu (uzyskanego z błony śluzowej jelita świńskiego), glicerol, bufor cytrynianowy oraz wodę.

OSTRZEŻENIA:

HYLO PARIN® należy dawkować indywidualnie według uznania lub zalecenia lekarza okulisty. Zwykle zakrapla się 1 kroplę do worka spojówkowego każdego oka 3 do 6 razy dziennie. W przypadku częstszego zakraplania (np. powyżej 10 razy dziennie), należy poddać się badaniu okulistycznemu. HYLO PARIN® przeznaczony jest do ciągłego stosowania. Przy utrzymujących się przez długi czas (np. dłużej niż 2 tygodnie) dolegliwościach (tak jak to ma miejsce w przypadku każdej innej choroby), należy zasięgnąć porady lekarza. Kiedy nie należy stosować HYLO PARIN®. HYLO PARIN® nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu. Jakich wskazówek dotyczących przechowywania HYLO PARIN® należy przestrzegać? Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25 °C. Po otwarciu opakowania bezpośredniego można stosować przez okres 6 miesięcy. Nie stosować po upływie terminu ważności (). Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.