

# Komora inhalacyjna KI-200 logo Apteo 1 szt



Cena: 42,74 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
Substancja czynna	-

## Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny  
PRODUCENT: APTEO  
ILOŚĆ: 1 szt.

Komora inhalacyjna KI-200 APTEO

Komora inhalacyjna jest urządzeniem ułatwiającym stosowanie leków w postaci aerozoli do inhalacji (po konsultacji z lekarzem).

Sposób użycia:

Należy zapoznać się z pełną instrukcją używania przed przystąpieniem do inhalacji.

1. Zdejmij osłonkę z dozownika z lekiem i umieść go we wskazanym na rysunku miejscu.
2. Potrząśnij dozownikiem zamocowanym do tuby, z założoną maseczką.
3. Przyłóż maseczkę do twarzy tak, by zakrywała usta i nos.
4. Po wykonaniu wydechu uruchom dozownik i wykonując głęboki, powolny wdech, przyjmij dawkę leku.
5. Wstrzymaj oddech na 8-10 sekund lub oddychaj powoli przez komorę, biorąc 2-3 wdechy (w zależności od zaleceń lekarza).
6. Przed kolejnymi powtórzeniami inhalacji postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w ulotce dołączonej do leku i dozownika.
7. Po zakończeniu inhalacji wyjmij z komory inhalacyjnej dozownik z lekiem.

Komora inhalacyjna powinna być czyszczona regularnie, najlepiej bezpośrednio po użyciu, zwłaszcza przy widocznym zabrudzeniu.

Ostrzeżenie:

Komora inhalacyjna nie jest przeznaczona do zabawy,

- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić czy komora lub maska nie uległy uszkodzeniu. Jeżeli któraś z części jest uszkodzona, to nie należy jej używać,
- Nie czyścić w zmywarce do naczyń, nie poddawać procesowi gotowania bądź sterylizacji,
- Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją używania.