

Kompres żelowy SANITY ciepły/zimny (10x26)



Cena: 21,54 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	ALBERT-POLSKA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: wyrób medyczny
 PRODUCENT: SANITY
 ILOŚĆ: 1 szt.

Kompres żelowy Sanity Flex Standard ciepły/zimny

Kompres żelowy Sanity Flex Standard to doskonała odpowiedź na ostre urazy na przykład stawu skokowego, czy bóle mięśniowo-szkieletowe. Kompres nadaje się do stosowania jako zimny oraz ciepły okład na wszelkiego rodzaju obrzęki, opuchlizny i urazy stanowiąc przy tym doskonałą alternatywę dla leczenia farmakologicznego. Kompres wypełniony jest żelem bezpiecznym dla środowiska i jest wyposażony w specjalny, przyjemny w dotyku pokrowiec ochronny, zapinany na rzepę z gumką, która umożliwia swobodne użycie bez konieczności angażowania rąk.

Jak stosować kompres żelowy?

Kompres NA ZIMNO:

Pomaga w ostrych urazach, takich jak skręcenie stawu skokowego,
 Łagodzi przewlekłe bóle spowodowane urazami układu mięśniowo-szkieletowego,
 Zmniejsza obrzęki, stany zapalne i ból.

Kompres NA CIEPŁO:

Leczy przewlekły ból mięśniowo szkieletowy
 Łagodzi ból
 Redukuje skurcze mięśni (np. ból pleców, bóle menstruacyjne)
 Reumatoidalne zapalenie stawów i bóle stawów

SPOSÓB UŻYCIA:**Zimne okłady:**

umieść kompres w zamrażalce na minimum 2 godziny w temperaturze -18 stopni Celsjusza. Osusz kompres przed umieszczeniem go w pokrowcu/zawinięciem w materiał. Połóż kompres na odpowiedniej części ciała. Trzymaj kompres na ciele, dopóki będzie to dla ciebie wygodne, maksymalnie do 20 minut. Przed ponownym użyciem kompresu na tę samą część ciała pozostaw to miejsce odkryte przez 20 minut.

Ciepłe okłady:

W kuchence mikrofalowej podgrzewaj przez około 4 minuty w temperaturze rozmrażania lub zanurz kompres w gorącej wodzie na około 5 minut. Osusz, włóż do ochronnego pokrowca, a następnie zastosuj na ciało.

OSTRZEŻENIA:

Nie stosować w następujących przypadkach: ostre stany zapalne; stan zapalny skóry; zakrzepica żył głębokich; choroba naczyń obwodowych; zaawansowana choroba serca; zaburzenia czucia (np. związane z cukrzycą); u dzieci poniżej 3 roku życia; obniżenie lub brak wrażliwości na ciepło/zimno. Zespół Raynauda; alergia na zimno; reumatoidalne zapalenie stawów (zimny okład); zakrzepica żył głębokich; nieleczone nadciśnienie.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.