

Lancety OPTILETS 50 szt.

Cena: 12,36 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	50 szt.
Postać	-
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Jednorazowe sterylne lancety do punktowego nakłuwania skóry w celu pobrania próbki krwi kapilarnej.

DZIAŁANIE:

Lancety OPTILETS to sterylne ostrza dedykowane do nakłuwacza OPTILET, przeznaczone do jednorazowego użytku. Lancety umożliwiają punktowe nakłuwanie skóry w celu uzyskania optymalnej próbki krwi kapilarnej. Próbka uzyskanego osocza może zostać wykorzystana przez pacjenta do przeprowadzenia wiarygodnego pomiaru stężenia glukozy we krwi.

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Umyj ręce ciepłą wodą z mydłem i dobrze je osusz
2. Umieść lancet w nośniku nakłuwacza
3. Usuń nasadkę zabezpieczającą
4. Wybierz miejsce nakłucia
5. Wykonaj nakłucie
6. Wykonaj pomiar poziomu glukozy zgodnie z instrukcją, oczyść miejsce nakłucia
7. Załóż nasadkę zabezpieczającą i wyrzuć lancet do odpowiedniego pojemnika

OSTRZEŻENIA:

Produkt jednorazowego użytku. Ponowne stosowanie zużytego lancetu przez tę samą osobę lub inną osobę wiąże się z ryzykiem zakażenia mikrobiologicznego.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Zużyte lancety w bębunku wymienić zgodnie ze wskazówkami.

Zużyte lancety zawsze należy wyrzucić do odpowiedniego kosza.