

OMRON Ciśnieniomierz naramienny M2 Basic

Cena: 109,40 PLN



Opis słownikowy

Opakowanie	1 op.
Producent	PRODUCENCKA CENTRALA FARMAC.PROCEFAR SP. Z O.O
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

Opis produktu

OMRON Ciśnieniomierz naramienny M2 Basic

Za pomocą OMRON M2 Basic możesz teraz wygodnie, szybko i dokładnie mierzyć ciśnienie krwi. Jest wyposażony w technologię Intellisense, która zapewnia mniejszy dyskomfort spowodowany nadmiernym napełnieniem mankieta. Może także wykryć nieregularne bicie serca podczas zwykłego monitorowania ciśnienia krwi.

Właściwości:

- wykrywanie nieregularnego bicia serca
- wskaźnik założenia mankieta
- technologia Intellisense zapewnia dokładniejszy i łatwiejszy odczyt
- zweryfikowana klinicznie

Sposób użycia:

Gdy mankieta jest prawidłowo założony, rzep jest na zewnątrz pętli mankieta, a metalowy pierścień nie dotyka skóry. Jeżeli mankieta jest otwarty, przesuń go do końca najdalej od przewodu przez metalowy pierścień, tworząc pętlę. Gładka tkanina powinna znajdować się wewnątrz pętli mankieta.

1. Usuń obcisłą odzież ze swojego ramienia.
2. Usiądź na krześle ze stopami płasko na podłodze.
3. Przełóż lewą rękę przez pętlę mankieta. Dno mankieta powinno być około 1 - 2 cm powyżej łokcia (grubość palca wskazującego lub środkowego). Umieść mankieta wokół ramienia, tak żeby przewód biegł wzdłuż osi ramienia, zgodnie ze środkowym palcem.
4. Zabezpiecz mankieta wokół ramienia, korzystając z rzepa. Wyrównaj brzegi mankieta, tak aby górna i dolna krawędź przylegała do ramienia.
5. Ściśnij mankieta mocno, ale nie za mocno, tylko na tyle, aby było trudno przesunąć 2 palce pod mankieta. Przestrzeń ta jest niezbędna dla dokładnego odczytu, ponieważ ciśnieniomierze OMRON wykorzystują metodę oscylometryczną pomiaru ciśnienia krwi, która wykrywa przepływ twojej krwi w tętnicy ramiennej i przetwarza ten ruch na dane cyfrowe.
6. Rozluźnij rękę i umieść łokieć na stole, tak aby mankieta był na tym samym poziomie co serce. Obróć dłoń w górę.
7. Sprawdź, czy nie ma żadnych załamania przewodu powietrza. Należy uważać, aby nie opierać łokcia na przewodzie z powietrzem podczas wykonywania pomiaru ciśnienia krwi.
8. Naciśnij O / I START" lub przycisk "Start", aby rozpocząć pomiar ciśnienia krwi. Dodatkowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Specyfikacje:

Rodzaj urządzenia: Ciśnieniomierz ramieniowy

- Rodzaj mankieta: Mankiet średni 22–32 cm
- Pamięć: Ostatni pomiar
- Wskaźnik założenia mankieta: Tak
- Funkcja wykrywania nieregularnego bicia serca: Tak
- Badanie: Badanie kliniczne
- Technologia Intellisense: Tak
- Zastosowanie komercyjne/profesjonalne: Użytek komercyjny
- Długość (cm): 12,50
- Wysokość (cm): 16,50
- Głębokość (cm): 11,80
- Waga urządzenia (g): 574,00