

## Opatr.hydrokol. GRANUFLEX 10x10cm 1 szt.



Cena: 7,69 PLN

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	CONVATEC POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	Emplastry hydrocolloidosa

### Opis produktu

**RODZAJ REJESTRACJI:** Wyrób medyczny

**PRODUCENT:** CONVATEC

**ILOŚĆ:** 1 sztuka

#### OPIS:

Granuflex to opatrunek hydrokoloidowy o wymiarach 10 x 10 cm.

#### DZIAŁANIE:

Granuflex opatrunek hydrokoloidowy na rany przewlekłe (owrzodzenia podudzi na tle niewydolności żylniej i tętniczej, odleżyny, owrzodzenia cukrzycowe), jak i na rany ostre, częściowe oparzenia stopnia I do IIa, czy miejsca donorowe. Może być stosowany we wszystkich etapach leczenia, również w ranach z martwicą suchą lub rozplywną.

#### SKŁAD:

Substancja czynna – aktywny hydrokoloid – cząsteczki karboksymetylocelulozy (20%), żelatyny (20%) i pektyny (20%), zawieszony w

masie hydrofobowego poliisobutyleno sodowego (40%).

#### SPOSÓB UŻYCIA:

Opatrunek Granuflex nakłada się na rany zdezynfekowane roztworem dowolnej substancji, nie opisano interakcji między znanymi środkami dezynfekującymi a aktywnym hydrokoloide. Opatrunek nakładać na powierzchnie osuszone uprzednio jałową gazą. Musi on zajmować margines skóry nieuszkodzonej (około 2–3 cm). Opatrunek hydrokolooidowy należy zmienić, gdy zaczynają się spod niego wydobywać nadmierne ilości wysięku, uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie i higienę pacjenta. W zależności od stopnia wilgotności rany następuje to zwykle między 2 a 6 dniem od momentu założenia opatrunku na ranę. Opatrunki hydrokolooidowe można łatwo przycinać, by dostosować je do kształtu, wielkości i lokalizacji rany. Warstwa wewnętrzna opatrunku jest samoprzylepna, nie wymaga więc on dodatkowego mocowania na ranie.

#### OSTRZEŻENIA:

Stosowanie opatrunku nie gwarantuje zabezpieczenia przed wirusem HIV.

Jest wodoodporny.

Opatrunki są łatwe w użyciu, elastyczne i mogą być docinane do kształtu rany.