

## Prezerwatywy DUREX Real Feel 16 szt.



Cena: 65,60 PLN

### Opis słownikowy

Opakowanie	16 szt.
Producent	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (POLAND) SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

1. Durex Real Feel to nielateksowe prezerwatywy zaprojektowane, by umożliwić partnerom seksualnym naturalne doznania "skóry na skórze".
2. Zostały wykonane z poliizopropenu, zaawansowanego technologicznie materiału, który może być z powodzeniem używany przez osoby uczulone na lateks.
3. Durex Real Feel (16 sztuk) to prezerwatywy gładkie, o standardowym rozmiarze, pokryte silikonowym lubrykantem i zakończone zbiorniczkiem.
4. Materiał, z którego wykonane są prezerwatywy Durex Real Feel jest bardzo miękki i daje wrażenie prawdziwej intymności i bliskości, co może prowadzić do większej przyjemności obojga partnerów.

### Cechy produktu / dane techniczne:

1. Rozmiar: standardowe (szerokość nominalna: 56 mm),
2. gładkie,
3. bez lateksu,
4. zakończone zbiorniczkiem,
5. w kształcie Easy-On,
6. pokryte silikonowym lubrykantem,
7. testowane elektronicznie,
8. wykonane z syntetycznej gumy nielateksowej – poliizoprenu.

### Sposób użycia:

1. Rozewnij folijkę ochronną, zaczynając od ząbkowanej krawędzi.
2. Uważaj, by nie uszkodzić prezerwatywy Durex paznokciami lub innymi przedmiotami.
3. Upewnij się, że zrolowana krawędź jest na zewnątrz prezerwatywy.

4. Ściśnij końcówkę prezerwatywy, by uniemożliwić dostanie się do niej powietrza.
5. Umieść prezerwatywę na czubku penisa w stanie wzwodu, pozostawiając nieco miejsca u jej szczytu.
6. Rozwiń prezerwatywę na całej długości penisa.
7. Upewnij się, że prezerwatywa nie ześlizguje się ani nie przylega do członka zbyt ściśle, bo może to prowadzić do jej uszkodzenia.
8. Po wytrysku mocno przytrzymaj prezerwatywę Durex Real Feel u podstawy członka, żeby nie zsunęła się podczas wyciągania penisa.
9. Wyrzuć prezerwatywę do kosza na śmieci. Produkt nie jest odpowiedni do splukiwania w kanalizacji.

**Ważne uwagi oraz informacje dodatkowe:**

1. Choć prawidłowe użycie prezerwatywy redukuje ryzyko ciąży, HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową, należy pamiętać, że żadna metoda antykoncepcyjna nie zapewnia 100% ochrony.
2. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
3. Z prezerwatywą Durex Real Feel używaj tylko takich żeli intymnych, które są odpowiednie do stosowania z prezerwatywami.
4. Przed stosunkiem zapoznaj się z instrukcją zawartą w opakowaniu produktu.
5. Prezerwatywy należy wyrzucać do kosza na śmieci.
6. Nie należy splukiwać prezerwatyw w kanalizacji.