

# Protefix Krem mocujący Premium Mocow. 47g

Cena: 19,38 PLN



## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	47 g
Postać	-
Producent	FARMACOL LOGISTYKA
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Protefix Krem mocujący PREMIUM MOCOWANIE

#### DZIAŁANIE:

Protefix® Krem mocujący PREMIUM MOCOWANIE 7 x efekt!  
EKSTRA MOCNY - pielęgnacja dziąseł - komfort przez cały dzień

1. Ekstra mocny: mocuje natychmiast zapewniając komfort przez cały dzień
2. Skuteczne uszczelnianie: protezy zębowej przed przedostaniem się drobinek jedzenia
3. Trzyma na mokro: można nanosić na mokrą protezę zębową dzięki elastycznej warstwie między dziąsłami a protezą zębową
4. Długotrwały komfort: dzięki elastycznej warstwie między dziąsłami a protezą zębową
5. Pielęgnacja dziąseł: ochronne działanie witaminy E
6. Ziołowa moc: dzięki formule z mirrą, szałwią i rumiankiem
7. Łagodna świeżość: przyjemnie łagodny i świeży smak mięty

Protefix® Krem mocujący PREMIUM MOCOWANIE działa natychmiast i zapewnia komfort przez cały dzień\* nawet w przypadku trudnych warunków w jamie ustnej.

#### WSKAZANIA:

Mocuje protezę zębową od 8 do 12 godzin.

#### DAWKOWANIE:

Dawka dobową: do 0,8 g kremu mocującego. Należy wyczyścić protezę zębową i błonę śluzową jamy ustnej z resztek pokarmu. Krem mocujący Protefix® PREMIUM MOCOWANIE nałożyć na oczyszczoną, mokrą lub suchą protezę zębową w odstępach (krótkimi odcinkami) jak na instrukcji (do zagłębienia w protezie szczęki lub żuchwy, którym proteza zębowa będzie przylegać do szczęki lub żuchwy). W razie potrzeby można nanieść pasek kremu mocującego Protefix® PREMIUM MOCOWANIE na tylną część płytki podniebiennej protezy szczęki. Następnie założyć protezę zębową, docisnąć ją przez kilka sekund do szczęki lub żuchwy i lekko przygryźć. Odczekać 5 minut przed przyjmowaniem posiłku.

Krem mocujący Prote fix® PREMIUM MOCOWANIE powinno się nakładać zgodnie z instrukcją gdyż przy nałożeniu nadmiernej ilości zmniejsza się skuteczność działania kremu.

#### SKŁAD:

Guma celulozowa (27%), sól wapniowo-sodowa kopolimeru, PVM/MA (26%), ciekła parafina, wazelina, krzemionka, wyciąg z rumianku pospolitego, octan tokoferylu, mirra, wyciąg z szałwii lekarskiej, mleczan mentylu, wyciągu z mięty, CI 14720.

#### OSTRZEŻENIA:

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

- Krem mocujący należy stosować tylko tymczasowo.
- Odpowiednie dopasowanie protezy należy regularnie poddawać kontroli.
- Nie stosować po upływie terminu ważności.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Należy dokładnie wycisnąć tubę przed użyciem aby uniknąć oddzielenia się oleju od kremu mocującego.
- Po użyciu należy starannie zamknąć tubę, dbając aby otwór tuby był czysty i suchy.
- Dostanie się wilgoci do tuby może spowodować stwardnienie kremu mocującego.
- Ewentualne resztki kremu mocującego można łatwo usunąć ze szczęki, żuchwy i podniebienia za pomocą wacika zwilżonego olejem jadalnym.