

SOFTEYE BLEPHA+ Chust.okulist.14szt.+1komp

Cena: 39,40 PLN



Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 zest.
Postać	-
Producent	ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

Softeye Blepha Plus

chusteczki okulistyczne x 14 szt. + ogrzewalny kompres

DZIAŁANIE:

Dzięki zastosowaniu formuły Hy-Ter® wyrób medyczny SOFTEYE BLEPHA jest wskazany do higieny powiek i rzęs, a także pomocniczo: jako środek odkażający przed i po zabiegach chirurgicznych, w leczeniu bakteryjnego i alergicznego zapalenia spojówek, w zapaleniu powiek i spojówek.

Zastosowanie ciepłego kompresu na oko w połączeniu z masażem powieki umożliwia odblokowanie i oczyszczenie ujść tych gruczołów, dzięki czemu mogą one wznowić naturalną produkcję lipidów niezbędnych do utrzymania w dobrym stanie filmu łzowego.

WSKAZANIA:

CHUSTECZKI OKULISTYCZNE DO CODZIENNEJ HIGIENY POWIEK DLA OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI SOFTEYE BLEPHA to jednorazowe chusteczki z naturalnej bawełny, nasączone roztworem zawierającym Hy-Ter® (hialuronian sodu i naturalny ekstrakt z drzewa herbacianego) i aloe - o działaniu oczyszczającym, zmiękczającym, kojącym i udrażniającym.

DAWKOWANIE:

Rozgrzej kompres do momentu zmiany barwy z pomarańczowej na żółtą. Zmiana zabarwienia na żółte oznacza, że kompres osiągnął temperaturę odpowiednią do wykonania skutecznego masażu oka.

JAK ROZGRZAĆ KOMPRES

Kompres można rozgrzać następującymi sposobami:

Trzymaj kompres pod bardzo gorącą wodą z kranu do momentu zmiany zabarwienia.

Trzymaj za skrzydełko kompres zanurzony w gorącej wodzie, aż jego barwa zmieni się z pomarańczowej na żółtą.

Przed wykonaniem masażu oka zawsze sprawdź temperaturę kompresu, przykładając go do wewnętrznej strony swojego nadgarstka.

Jeśli jest zbyt gorący, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

Jeśli barwa nie jest jednorodna, potrząśnij kompresem przed użyciem.

Trzymaj ciepły kompres za skrzydełko, przez 3-5 minut masuj powiekę z lekkim naciskiem.

Zaraz po zaaplikowaniu kompresu na oko otwórz saszetkę korzystając z nacięcia i wyjmij chusteczkę.

Rozłóż chusteczkę i delikatnie oczyść powieki i rzęsy w kierunku od wewnętrznego kącika oka do zewnętrznego, cały czas trzymając oko zamknięte.

Po użyciu opłucz kompres wodą i umieść z powrotem w opakowaniu. Jeśli kompres nie powróci do pierwotnego koloru, schowaj go na noc do lodówki. Przed ponownym użyciem sprawdź, czy kompres nie jest uszkodzony.

Używaj jednej chusteczki na jedno oko. Po użyciu umyj ręce.

Nie przemywaj oka po zastosowaniu produktu.

SKŁAD:

Woda, PEG / PPG – 20/15 dimetikon, wyciąg z aloesu zwyczajnego, Hy-Ter® (hialuronian sodu, 4-terpineol), glicyryzian amonu, glukozyd kaprylowo-kaprynowy, sól sodowa kokoiloaminokwasów pszenicy, etyloheksylogliceryna, alkohol fenyloetylowy, chlorek sodu, fosforan sodu, wodorofosforan sodu, PPG-26 Buteth-26, PEG-40 uwodorniony olej rycynowy

OSTRZEŻENIA:

Do użytku zewnętrznego: do stosowania wyłącznie w okolicach oka, przy zamkniętych oczach. Nie stosować produktu w przypadku zdiagnozowanej nadwrażliwości na dowolny jego składnik. W razie utrzymującego się uczucia pieczenia należy przerwać stosowanie. Należy uważnie przestrzegać instrukcji dotyczących ogrzewania kompresu i sprawdzania jego temperatury. Nie stosować ponownie częściowo zużytej chusteczki, aby uniknąć zanieczyszczenia produktu i osłabienia jego skuteczności. Każda saszetka jest przeznaczona do jednorazowego użytku; należy otworzyć ją bezpośrednio przed zastosowaniem.

Nie stosować, gdy saszetka jest niedomknięta i/lub opakowanie jest uszkodzone. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie przebijać kompresu i/lub połykać produktu. Po wykorzystaniu ostatniej chusteczki należy wyrzucić kompres.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.