

# TENfertil Żel nawilżający 6 szt. po 5ml



Cena: 48,00 PLN

## Opis słownikowy

Opakowanie	6 aplik. po 5 ml
Postać	żel
Producent	HEALTHCARE SCIENCE SP. Z O.O.
Rejestracja	

## Opis produktu

### TENfertil żel nawilżający dopochwowy

to wyrób medyczny wspomagający stworzyć środowisko pochwy sprzyjające zapłodnieniu.

#### Skład

Woda, glukoza, fruktoza, hialuronian sodu, cytrynian magnezu, pirogronian wapnia, sorbitol, kwas mlekowy, kwas cytrynowy, inozytol, cytrynian potasu, wodorowęglan sodu, glukonian cynku, karnityna, kreatyna, chlorek sodu, DMDM hydantoina, wodorotlenek sodu, fenoksyetanol, etyloheksylogliceryna, hydroksyetyloceluloza.

#### Zawartość opakowania

6 aplikatorów jednodawkowych o pojemności 5 ml każdy.

#### Przeznaczenie produktu

Nawilżający żel dopochwowy może być stosowany przez osoby starające się o poczęcie potomstwa.

## Charakterystyka produktu

Żel tworzy optymalne środowisko dla plemników, przyczynia się do utrzymania wartości pH odpowiedniej dla naturalnego poczęcia. Żel nie plami, nie zawiera parabenów, silikonów i olejów mineralnych, posiada środki konserwujące zgodne z przeznaczeniem.

## Sposób użycia

Żel należy stosować w fazie owulacji, zwłaszcza w najbardziej płodnych dniach cyklu (13, 14, 15 cyklu). Żelu należy użyć 5 minut przed stosunkiem. W celu aplikacji należy złamać plombę na końcu kaniuli jednowazowego aplikatora. Wprowadzić aplikator do pochwy. Naciskać aplikator aż do całkowitego opróżnienia tubki.

## Ostrzeżenia i środki ostrożności

- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą
- Nie należy stosować produktu po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
- Nie zaleca się stosowania preparatu u dzieci. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować u osób uczulonych na którykolwiek składnik produktu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.