


Test Amniocheck na wyciek wód płodowych

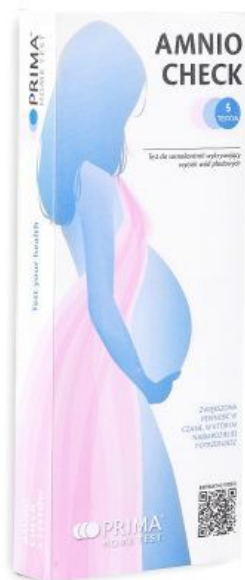

Cena: 78,75 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	5 szt.
Producent	FARMABOL SP. Z O.O.
Rejestracja	

Opis produktu

TEST AMNIOCHECK do samokontroli wykrywający wyciek wód płodowych

jest łatwym w użyciu testem in vitro w postaci wkładek pozwalający wykryć prawdopodobny wyciek wód płodowych u kobiet w ciąży.

Czym jest płyn owodniowy (wody płodowe)?

Płyn owodniowy to podobna do wody substancja otaczająca płód w macicy. Płód rośnie w worku owodniowym wypełnionym płynem owodniowym podczas ciąży. Worek owodniowy tworzy się około 12 dni po zjściu w ciążę. Kiedy twoje wody odejdą (oznaka porodu), twój worek owodniowy pęknie i płyn owodniowy wycieknie z twojej pochwy.

Dla kogo jest przeznaczony Amniocheck ?

Wyrób Amniocheck zalecany jest dla kobiet ciężarnych znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka, jak i spoza tej grupy. Wyciekające wody płodowe zwiększają ryzyko infekcji zarówno dla matki jak i płodu, dlatego wczesne wykrycie może:

- zapobiec powikłaniom lub przedwczesnemu porodowi
- pomóc w zidentyfikowaniu możliwego przerwania błon płodowych, zwłaszcza po amniopunkcji
- pomóc w potwierdzeniu odejścia wód płodowych, aby pacjentka mogła dotrzeć do szpitala na czas w celu bezpiecznego przeprowadzenia akcji porodowej

Wyrób medyczny Amniocheck zawiera 5 wkładek, które pod wpływem zmiany pH (podwyższone pH charakteryzuje się przy wycieku wód płodowych w odróżnieniu od moczu) zmieniają barwę na niebieski lub zielony (o dowolnym natężeniu). Zmiana z koloru żółtego na niebieski lub zielony w którejkolwiek części wkładki świadczy o możliwym wycieku wód płodowych, należy to niezwłocznie skonsultować z lekarzem. Pasek pełniący funkcję wskaźnika we wkładce może zmienić barwę na niebieską też w przypadku infekcji pochwy - z tego powodu przy zmianie barwy wkładki jest ważny kontakt z lekarzem.

Jak używać wkładek Amniocheck?

Wkładka po wyjęciu z opakowania ma wskaźnik w kolorze jasnożółtym. Powinna być umieszczona w bieliznie (może być noszona jak zwykła wkładka do 12 godzin) bezpośrednio przy pochwie pacjentki. Gdy pacjentka poczuje wyciek płynu, należy zdjąć wkładkę i odczekać 15 minut. Po tym czasie sprawdź, czy kolor wkładki uległ zmianie.

Odczytywanie wyników:

Wyniki należy odczytać po 15 minutach od chwili zdjęcia wkładki z bielizny.

Zawartość opakowania:

5 Wkładek pakowanych pojedynczo w saszetkach.