

Test ciążowy BOBO-test strumieniowy 1 sztuka



Cena: 5,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	1 szt.
Postać	-
Producent	DIAGNOSIS S.A.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny
Substancja czynna	-

Opis produktu

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: DIAGNOSIS

ILO???: 1 sztuka

OPIS PODSTAWOWY:

Test BOBO-test strumieniowy jest szybkim i prostym w użyciu testem ciążowym do domowego użytku.

DZIAŁANIE:

Bobo-test strumieniowy został zaprojektowany tak, aby wykrywać nawet niewielkie ilości hormonu ciążowego hCG (gonadotropina kosmówkowa) w moczu.

WSKAZANIA:

Test ciążowy jest przeznaczony do wykrywania hormonu hCG już w 2-3 dni od momentu wzrostu hCG. Jeśli nie minął jeszcze pierwszy dzień spodziewanej miesiączki do przeprowadzenia testu należy użyć pierwszego porannego moczu. Jeżeli minął pierwszy dzień spodziewanej miesiączki, test można przeprowadzić o każdej porze dnia.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyjmij test z foliowego opakowania. Następnie zdejmij plastikową nasadkę z paska do absorpcji moczu. Pamiętaj, aby nie dotykać palcami do paska absorpcyjnego. 2. Test powinien być trzymany za uchwyt tak, aby widoczne było okno testowe. Na 5 sekund skieruj pasek absorpcyjny bezpośrednio na strumień moczu. Jeśli nie możesz utrzymać strumienia moczu przez 5 sekund, możesz umieścić mocz w czystym i suchym pojemniku, a następnie zamoczyć w nim 2/3 paska absorpcyjnego na 10 sekund. 3. Po 5 sekundach trzymania paska absorpcyjnego pod strumieniem moczu należy zakryć pasek absorpcyjny plastikową nasadką. Następnie połóż test na płaskiej powierzchni, aby widzieć okno testowe. 4. Od tego momentu zacznij mierzyć czas. Kiedy mocz zostanie wchłonięty, w oknie testowym w miejscu linii kontrolnej C powinnaś zobaczyć różową linię, która kontroluje działanie testu. 5. Dokładny wynik można odczytać w oknie testowym w 5 minucie (zob. rys. 2,3,4). Wynik pozytywny (ciąża) powinien pojawić się w czasie krótszym niż 5 min. Natomiast w celu potwierdzenia negatywnego wyniku (brak ciąży) należy poczekać pełne 5 minut. Po odczytaniu wyniku wyrzucić test. W przypadku negatywnego wyniku (brak ciąży) nie należy sugerować się zmianami w okienku testowym po upływie 5 minut, ponieważ na skutek zachodzących reakcji chemicznych wynik pokazany po tym czasie może być zafałszowany.