

## Test COVID-19 FlowFlex 1 szt.

Cena: 8,99 PLN



### Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O.SP.K.
Rejestracja	Wyrób medyczny inny

### Opis produktu

Flowflex SARS-CoV-2 szybki test antygenowy przeznaczony do wykrywania antygenów nukleokapsydowych wirusa SARS CoV2 w wymazach z przedniej górnej części jamy nosowej. Badanie można wykonywać zarówno u osób wykazujących objawy zakażenia (w ciągu pierwszych 7 dni od wystąpienia symptomów), jak i u osób, u których nie występują żadne objawy.

#### Zawartość opakowania

Opakowanie zawiera: 1 test kasetkowy, 1 probówkę na bufor ekstrakcyjny, 1 jednorazową wymazówkę, 1 torebkę na odpady, ulotkę informacyjną.

#### Przeznaczenie produktu

Test jest przeznaczony do wykrywania antygeny SARS-CoV-2 w próbce pobranej z przedniej części nosa.

#### Charakterystyka produktu

Czułość względna: 97,1% (95% CI: 93,1%-98,9%)\*  
Swoistość względna: 99,5% (95% CI: 98,2%-99,9%)\*  
Dokładność: 98,8% (95% CI: 97,6%-99,5%)\*

### Sposób użycia wyrobu medycznego

- Przed zastosowaniem należy przeczytać ulotkę informacyjną.
- Przed wykonaniem testu oraz po jego przeprowadzeniu należy dokładnie umyć ręce.
- Wsunąć końcówkę absorbenta wymazówki do otworu nosowego, jednak nie głębiej niż na 2,5cm, pobrać próbkę (pięciokrotnie obrócić końcówkę wymazówki we wnętrzu nosa), czynność powtórzyć w drugim otworze nosowym.
- Wymazówkę włożyć do próbki z buforem ekstrakcyjnym.
- Obracać patyczkiem przez przez 30 sekund.
- Następnie pięć razy obrócić wymazówkę, równocześnie ściskając boki próbki. Wyjąć wymazówkę z próbki, założyć na nią kroplomierz. Wymieszać dokładnie roztwór znajdujący się w próbce (należy obracać i stukać w dno próbki). Następnie delikatnie ściskając próbkę, wycisnąć 4 krople roztworu do zagłębienia na teście. Wynik odczytać po 15-30 minutach.