

Test Influenza na grypę 1 szt.



Cena: 17,83 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie	1 szt.
Postać	test
Producent	HYDREX DIAGNOSTICS SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	

Opis produktu

Test Influenza na grypę

to wyrób medyczny do wykrywania antygeny nukleoproteinowego wirusa grypy typu A oraz wirusa grypy typu B.

Skład

1 foliowa kopertka zawierająca 1 test oraz środek pochłaniający wilgoć, 1 probówka ekstrakcyjna z zatyczką, 1 sterylna wymazówka MDD 93/42/EEC, 1 bufor ekstrakcyjny 0,1 M roztwór soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS), 1 instrukcja używania wyrobu.

Charakterystyka produktu

Test na grypę Influenza to szybki test immunochromatograficzny do wizualnego wykrywania antygenów nukleoproteinowych wirusa grypy typu A i B wyekstrahowanych z wymazów z nosa lub gardła.

Sposób użycia wyrobu medycznego

Wymaz z nosa

- Jak pokazano na rys.1: Wyjąć z opakowania sterylną wymazówkę. Odchylić głowę do tyłu pod kątem 70°.
- Delikatnie włożyć wymazówkę do nozdrza, w którym widać najwięcej wydzieliny. Obróć wymazówkę dwukrotnie o 360 stopni. Docisnąć mocno do błony śluzowej nosa, aby zapewnić pobranie odpowiedniej próbki.

Wymaz z gardła

- Jak pokazano na rys. 2: Wyjąć z opakowania sterylną wymazówkę. Otworzyć usta i wysunąć język, w razie potrzeby użyć szpatułki laryngologicznej do przytrzymania języka.
- Potrzeć sterylną wymazówkę o powierzchnie dwóch migdałków i tylną część gardła. Unikać dotykania języka, policzków i zębów.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.