

# Zatoxin Rinse zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok



Cena: 20,02 PLN

## Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	30 sasz.
Postać	pr.do p.roztw.
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	-

## Opis produktu

### Zatoxin Rinse

zestaw uzupełniający do płukania nosa i zatok

Butelka do irygacji (max pojemność 300 ml), 12 saszetek w kartoniku z proszkiem do przygotowania roztworu do płukania nosa i zatok, dwie końcówki do irygacji klasycznej i łagodnej, instrukcja użytkowania.

**DZIAŁANIE:** Zatoxin® Rinse to wyrób medyczny, który stosuje się w stanach zapalnych zatok przynosowych, w nieżytach nosa różnego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych oraz profilaktycznie w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.

**WSKAZANIA:** Zestaw do płukania nosa i zatok zaleca się stosować:

- w zapaleniu zatok przynosowych
- w nieżycie nosa różnego pochodzenia
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok
- profilaktycznie, w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok

**DAWKOWANIE:** W przypadku zapalenia zatok przynosowych, w nieżycie nosa różnego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok oraz profilaktycznie, w celu zachowania higieny nosa i zatok zaleca się rozpuścić 1 saszetkę w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować izotoniczny roztwór do

irygacji.

W razie potrzeby, w przypadku silnych objawów takich jak np. uczucie swędzące nosa zaleca się rozpuścić 2 saszetki w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować hipertoniczny roztwór do irygacji.

Do przeprowadzenia płukania u osoby dorosłej należy użyć 120 ml roztworu na każdy otwór nosowy. W przypadku przeprowadzania płukania u dzieci należy użyć 60 ml roztworu na każdy otwór nosowy. Pozostały niewykorzystany roztwór należy wylać.

Płukanie nosa przeprowadza się 1-2 razy dziennie lub według wskazania lekarza, profilaktycznie stosować 2-3 razy w tygodniu.

**SKŁAD:** chlorek sodu, dwuwodnian sodu.

**OSTRZEŻENIA:** Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdy któryś z preparatów nie jest stosowany zgodnie z Twoim stanem lub zdrowiem. Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość (alergia) na którykolwiek ze składników wyrobu medycznego.

Całkowita blokada nosa uniemożliwiająca wydostanie się roztworu.

Nie stosować u osób, u których występuje poważne krwawienie z nosa.

Nie należy stosować wyrobu w przypadku otwartych ran w obrębie nosa, nie zagojonych ran po zabiegach chirurgicznych.

Nie stosować w infekcjach ucha spowodowanych przez np. zapalenie ucha, lub zatkanie ucha spowodowane przez zalegającą woskowinę.

Nie stosować u osób z zaburzeniami równowagi.

W przypadku przebytej operacji ucha, przed użyciem należy skontaktować się z lekarzem.